

Precauzioni d'uso

- Questo prodotto è solo per uso diagnostico in vitro.
- Non bere la soluzione conservante contenuta nella provetta di raccolta delle feci.
- Non rimuovere o ingoiare le perline nel tubo di raccolta delle feci.
- Occorre prestare attenzione per evitare il contatto con la soluzione conservante con la pelle o gli occhi.
- Se la soluzione conservante viene a contatto con la pelle o gli occhi, deve essere immediatamente lavata con acqua corrente.
- Fare attenzione a non ferirsi le mani durante l'apertura e la chiusura del coperchio.
- Quando si chiude il coperchio, assicurarsi di chiuderlo bene per evitare che il contenuto fuoriesca.
- Quando vai in bagno, assicurati che l'urina non penetri nella carta per la raccolta delle feci.
- Quando si posiziona il campione nel tubo di raccolta delle feci, non inserire alcun materiale diverso dalle feci, come la carta igienica.
- Non raccogliere le feci dopo la diarrea o l'assunzione di detergenti intestinali.
- Si prega di non riutilizzare questo prodotto in quanto è monouso.
- Utilizzare il prodotto sotto la direzione di un medico.

Ulteriori informazioni

- Questo prodotto è uno strumento per il trasporto e la conservazione di campioni allo scopo di diagnosticare malattie. Il prodotto viene utilizzato per la raccolta, il trasporto e la conservazione di campioni di feci umane.
- Questo prodotto è un kit in grado di raccogliere un campione e la provetta per la raccolta delle feci include 20 ml di soluzione conservante.
- Conservare il prodotto a temperatura ambiente.
- La data di scadenza di questo prodotto è di 18 mesi dalla data di produzione. Non utilizzare prodotti oltre la data di scadenza.
- Assemblaggio del prodotto.

Numero di serie	Componenti	Quantità
1	Provetta di raccolta feci	1 EA
2	Strumento campionamento feci	1 EA
3	Istruzioni per l'uso	1 EA
4	Etichetta	1 EA
5	Sacco per provetta e strumento di campionamento	1 EA
6	Sacco per lo smaltimento	1 EA
7	Carta per la raccolta feci	1 EA



ISTITUTO DIAGNOSTICO
VARELLI



Genomictree
Genomictree inc.

EarlyTect®

Powered by Novel DNA Biomarker

Screening non invasivo per il cancro al colon

Kit di raccolta delle feci Istruzioni per l'uso

Assicurati di aver letto le precauzioni per l'uso.

Kit di raccolta delle feci, trasporto dei campioni, SC02-3 Licenza prodotto n. IVD-21-427

Produttore: Genomictree, Inc. / www.genomictree.com

34027, 44-6 Techno 10-ro (Tamnip-dong), Yuseong-gu, Daejeon, Repubblica di Corea
GT-SC02-UM-703(RO) TEL: +82-42-861-4551 / FAX: +82-42-861-4552 / E-mail: help.sg@genomictree.com

Step 1: Controlla i componenti del prodotto



Controllare la presenza di tutti i componenti.

- 1) Provetta di raccolta
- 2) Strumento di raccolta
- 3) Istruzioni per l'uso
- 4) Etichetta
- 5) Sacco per il tubo di raccolta
- 6) Sacco per lo smaltimento
- 7) Carta per raccolta feci


Step 2: Preparazione alla raccolta delle feci



Step 3: Raccolta feci



Step 4: Attaccare l'etichetta

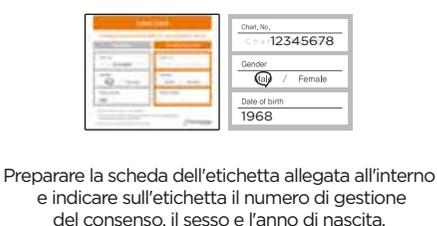

Step 5: Invia il tubo di raccolta delle feci

